

ООО «Мега-Трейд»


143396, г. Москва, хутор Ильичевка, стр.3, оф.2/2

Тел/факс: (495) 777-36-00

Пандусы мобильные по ТУ 25.11.23-002-49356292-2019

ПАСПОРТ

Мобильный пандус телескопический 2-ух секционный

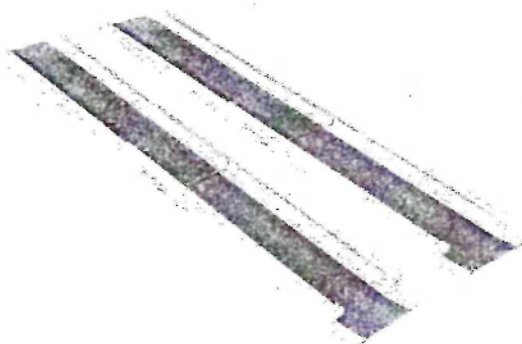

Производитель: ООО «Мега-Трейд» (Россия)

Модели: Мега 2ПТ1-90, Мега 2ПТ1-120, Мега 2ПТ1-150, Мега 2ПТ1-180,
Мега 2ПТ1-210, Мега 2ПТ1-240, Мега 2ПТ1-270

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ25.Н01767

Срок действия с 05.02.2020г. по 04.02.2023г.

Грузоподъемность: **300 кг**

модель	Длина в раб. полож.	Длина в сложен. виде	Вес
Мега 2ПТ1-90	90 см	60 см	4,2 кг
Мега 2ПТ1-120	120 см	76 см	5,4 кг
Мега 2ПТ1-150	150 см	92 см	6,6 кг
Мега 2ПТ1-180	180 см	106 см	7,8 кг
Мега 2ПТ1-210	210 см	120 см	9 кг
Мега 2ПТ1-240	240 см	136 см	12,5 кг
Мега 2ПТ1-270	270 см	151 см	14,1 кг

Пандус алюминиевый телескопической конструкции – комплект из двух 2-ух секционных аппарелей. Оборудованы противоскользящими накладками. Предназначены для удобства передвижения инвалидов на креслах-колясках как в помещениях, так и на улице для преодоления перепадов высот. Поставляются парами. Оборудованы кнопочным фиксатором в сложенном и разложенном виде.

Условия хранения и эксплуатации:

Хранить в помещении без превышения влажности (до 70%). Для преодоления порогов, небольших лестниц, бордюров пандус возможно использовать в неразобранном состоянии, используя первую секцию и устанавливая ее на две точки опоры.

Меры безопасности:

ВНИМАНИЕ! Распределенная нагрузка на обе направляющих (аппарели) пандуса не должна превышать 300 кг (150 кг на каждую аппарател) (см рис.1). Перед использованием проверьте надежность установки пандуса на опорной площадке. При использовании пандуса в разложенном виде убедитесь в надежной фиксации кнопочного механизма. Не превышайте максимальный перепад высоты (МВП):
Мега 2ПТ1-90 – 15 см; Мега 2ПТ1-120 – 20 см
Мега 2ПТ1-150 – 25 см; Мега 2ПТ1-180 – 30 см
Мега 2ПТ1-210 – 35 см; Мега 2ПТ1-240 – 40 см;
Мега 2ПТ1-240 – 45 см



Рис.1

Гарантия на изделия – 1 год с момента продажи. Гарантия не распространяется в случаях не соблюдения условий хранения и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия, на повреждения, вызванные злоупотреблением, аварийными и любыми запрещенными изменениями оригинальной формы изделия.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Мега-Трейд»

Адрес: 143396, Россия, г. Москва, посел. Первомайское, х. Ильичёвка, стр. 3, оф. 2/2
Контактный телефон: (495) 777-36-00

06 июля 2020

Дата изготовления _____ м.п.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Оформляется продавцом

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мега-Трейд»

ПРОДАВЕЦ: _____

название организации, адрес, телефон

Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне. В случае обнаружения неисправностей и брака изделия в гарантийный период, покупатель обращается к продавцу для его ремонта с предоставлением гарантийного талона.

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ м.п.

Подпись покупателя _____ / _____